



ELECTROTECNIA
FIORINO

EMERGENCY, RESCUE, TRAINING AND HOME CARE PRODUCTS

Autorizado por Ministerio de Salud, A.N.M.A.T. P.M. -1236

CAMILLA PLASTICA ENROLLABLE

Camilla PE YDC-8 A 6



MANUAL DEL USUARIO

Electrotecnia Fiorino

Condarco 1832 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (+54 11) 4581 3700 - Fax: (+54 11) 4583 5575



¡Por favor, lea este manual con cuidado antes de usar el producto!

I, USO PREVISTO

Producto médico para traslado de pacientes heridos. .

II, Características


- 1, La camilla está fabricada con materiales seguros y livianos.
- 2, Radiotransparente, permite sacar radiografías con facilidad.

III, Parámetros técnicos

Modelo	YDC-8A6
Tamaño de la camilla desplegada (L x A)	244 × 92 cm
Carga que soporta:	120 kg

IV, Método de uso

Desdoble el producto totalmente y coloque al paciente en la camilla. Ajuste cada pierna por separado con un cinturón de seguridad (como se muestra en el círculo figura 1). Fije la zona del tórax a la superficie de la camilla. Utilice cuatro cinturones de seguridad para sujetar al paciente (flecha 2 de la figura 1). Luego, trasládalo tomando las manijas (flecha 1 de la figura 1). En algunas circunstancias especiales, como una playa, las montañas u otros lugares, pueden utilizarse los cordones ajustables (flechas 3 y 4 de la figura 1) para tirar de la camilla o levantarla.

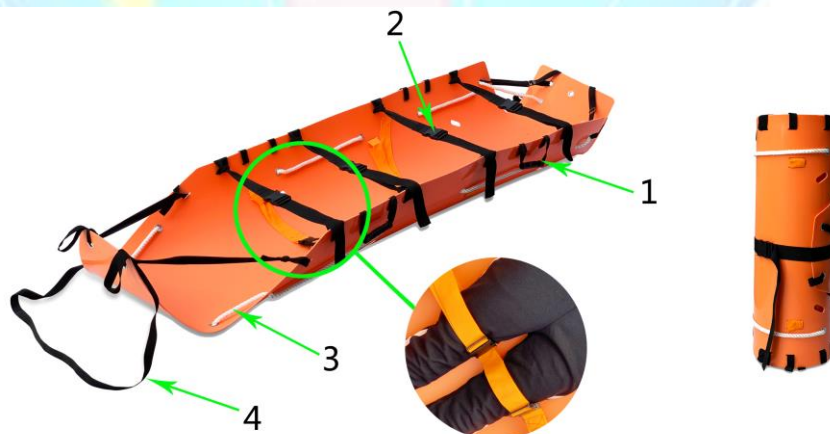

(Figura 1)

V. Precauciones

- 1、 Los operadores deben practicar el uso de esta camilla y poseer conocimientos en técnicas de primeros auxilios. Durante el uso, el operador debe seguir las instrucciones pertinentes; de lo contrario, nuestra empresa no se hará responsable.
- 2、 Queda terminantemente prohibido usar este producto de manera ilegal o inapropiada. No sobrecargue la camilla. De esta manera, evitará usarla de manera inapropiada y dañarla.

VI. Mantenimiento

- 1、 Manténgala limpia y desinfectada.

VII. Almacenamiento

- 1、 Guárdela en un lugar libre de humedad y de sustancias corrosivas.
- 2、 Guárdela y transportéla como se hace con los elementos apilados.

VIII. Transporte

- 1、 Puede transportarla vía aérea, marítima o terrestre.
- 2、 Puede transportarla en forma manual.

